



ZHIVAS LTD

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

SEPTOQUAT AM MD

CONCENTRAT PENTRU DEZINFECȚIA INSTRUMENTELOR A DISPOZITIVELOR MEDICALE INVAZIVE ȘI NON-INVAZIVE

CE 0120

Aria de aplicare

Septoquat AM MD se utilizează pentru dezinfectia și curățarea înainte de sterilizare a instrumentelor chirurgicale, stomatologice și a altor instrumente, a echipamentelor și dispozitivelor medicale, inclusiv a celor care conțin materiale termo-sensibile.

De asemenea este utilizat pentru dezinfectia finală a instrumentelor și dispozitivelor medicale non-invazive.

Septoquat AM MD este adecvat pentru utilizarea în băile cu ultrasunete.

Proprietăți

Septoquat AM MD este un preparat pe bază de alchilamină, compuși de amoniu cuaternar și surfactanți. Nu conține aldehyde, fenoli sau clor activ. La concentrații relativ scăzute, preparatul demonstrează un spectru larg de acțiune microbiologică. Încărcătura organică nu afectează activitatea biocidă a soluției de lucru.

Septoquat AM MD are o putere mare de curățare. Împiedică uscarea pe suprafața instrumentului a materiei organice. Proteinele solubile în apă sunt desprinse cu ușurință de pe suprafață.

Septoquat AM MD are o excelentă compatibilitate cu materialele și are un potențial alergic scăzut.

Aspect	lichid galben deschis
pH concentrat	9.5 - 10.5
Densitate (20 C°)	0.95 – 0.99 g/cm ³

Compoziție

Fiecare 100 g Septoquat AM MD conțin:

Substanțe active:

- 10 g Benzalkonium chloride (CAS 68424-85-1)
- 5 g Didecyl dimethyl ammonium chloride (CAS 7173-51-5)
- 6 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (CAS 2372-82-9)

Ingrediente auxiliare:

Inhibitori de coroziune, surfactanți neionici, solvent, parfum.



Clasificări

Septoquat AM MD respectă cerințele pentru dezinfectante chimice ale Directivei Europene pentru Dispozitive Medicale 93/42 CEE și este clasificat ca dispozitiv medical – Clasa IIb.

Spectru de acțiune

Bactericid – mycobactericid (incl.Tbc) - fungicid - virucid.

Activitate microbiologică	Concentrație	Metoda testată	Timp de acțiune
Bactericid (<i>P.aeruginosa</i> , <i>MRSA</i> , <i>S.aureus</i> , <i>E.hirae</i>)	0.25%	EN 13727 EN 14561	60 min
	0.75%		15 min
	2.00%		5 min
Fungicid (<i>C.albicans</i> , <i>A.niger</i>)	0.25%	EN 13624 EN 14562	60 min
	0.75%		15 min
	2.00%		5 min
Mycobactericid/ tuberculocid (<i>M.terrae</i> , <i>M.avium</i>)	2.00%	EN 14348	60 min
Virucid (<i>Polio</i> , <i>Adeno</i> , <i>Noro</i>)	0.75%	EN 14476	15 min

Metoda de aplicare

Septoquat AM MD este sub formă de concentrat și trebuie utilizat în conformitate cu concentrațiile și timpii de acțiune recomandate (vezi tabelul Indicații de utilizare). Se recomandă curățarea instrumentelor înainte de dezinfecție. A se evita contactul dintre preparat și soluția lui de lucru cu aldehidele.

Procedura de imersie în soluția de lucru

Folosiți căpăcelul dozator furnizat cu produsul și apă de la robinet pentru prepararea soluției de lucru. Turnați cantitatea de apă necesară în cuvă și adăugați progresiv cantitatea potrivită de concentrat. Amestecați. Desfaceți sau demontați cât este posibil din părțile instrumentarului și imersați în soluția de lucru. Asigurați-vă că toate suprafețele și cavitățile instrumentelor sunt complet acoperite. După dezinfecție, clătiți și curățați instrumentele complet.

Pentru băile cu ultrasunete se utilizează aceeași procedură.

Curățarea manuală și dezinfecția dispozitivelor medicale și a echipamentului

Preparați soluția de lucru necesară așa cum este descris mai sus. Utilizați mijloacele adecvate (cârpă, șervețel nețesut), înmuiați complet în soluție și ștergeți suprafețele până sunt acoperite complet de soluție și lăsați să acționeze. După timpul de expunere, uscați dacă este necesar.



ZHIVAS LTD

Indicații de utilizare

Metoda de aplicare	Activitate	Soluția de lucru	Timp de acțiune
Instrumente și dispozitive medicale invazive și non-invazive	Bactericid și fungicid	0.25 % (2.5 ml/1 l)	60 min
	Bactericid, fungicid și virucid	0.75 % (7.5 ml/1 l)	15 min
	Bactericid, fungicid	2.00 % (20 ml/1 l)	5 min (baie ultrasunete)
	Mycobactericid	2.00 % (20 ml/1 l)	60 min

Avertizări

Eficiența Septoquat AM MD poate fi afectată de săpun, surfactanți anionici și clor activ.

Condiții de stocare

În ambalajul original închis ermetic, în locuri uscate și bine ventilate, la temperaturi între 5°C și 35° C. A nu se expune la razele solare.

Precauții

În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și contactați medicul. În caz de contact cu pielea, clătiți imediat cu multă apă. În caz de înghițire, nu induceți voma, contactați imediat medicul, dacă este posibil, arătați eticheta.

Tratamentul deșeurilor și a ambalajului – în conformitate cu legislația locală

Nu aruncați concentratul în mediul înconjurător – pentru eliminarea deșeurilor, reziduurilor și a ambalajului gol, consultați instrucțiunile din Fișa cu date de securitate.

Ambalare:

Flacoane (HDPE) de 1 L.

Termen de expirare: 3 ani.

ZHIVAS Ltd.

14, Assen Yordanov Blvd. 1592 Sofia, Bulgaria
Tel/fax: +359 2 9817823, +359 2 9802507
zhivas@techno-link.com; www.zhivas.com

